


SARS-COV-2 PCR LOLLI-TEST FÜR SCHULEN

Versandvorbereitung


SAMMELPROBE FÜR POOL-PCR

SAMMELPROBE FÜR POOL-PCR:

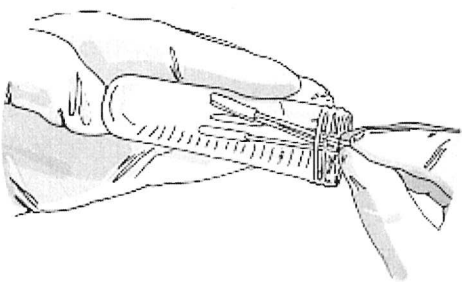


1.

Die Lollipop-Stäbchen aus einer Klasse/keinem Kurs werden in einem beigefügten, großen Schraubgefäß gesammelt und das Gefäß wird zugeschraubt

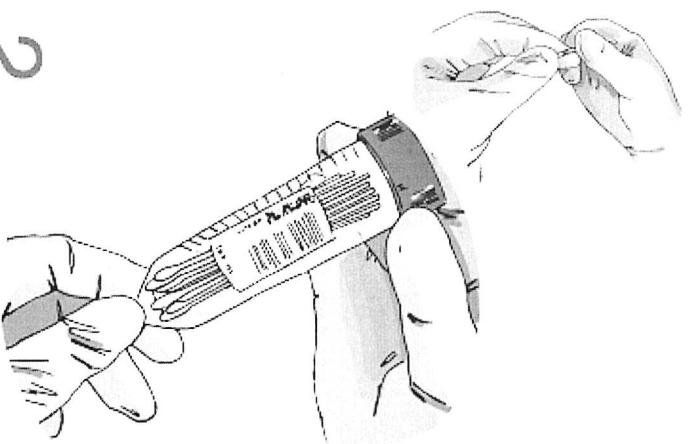

2.

Das Gefäß wird mit der 10-stelligen Labornummer aus der digitalen Anmeldung beschriftet. Falls vorge-druckte Barcodes von uns ausgehändigt werden, diese bitte mit dem Barcode in Längsausrichtung (senkrecht) auf das Schraubgefäß kleben.

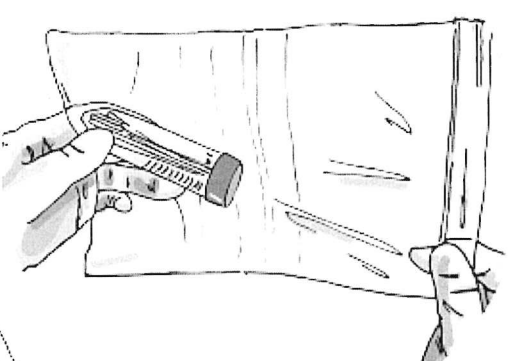

3.

Das so beschriftete Schraubgefäß wird in die kleine Plastiktüte gelegt. Gegebenenfalls durchgeführte Einzeltests in Abstrichröhrchen aus dieser Klasse/diesem Kurs werden ebenfalls hinzugefügt. Die Tüte wird verschlossen.





4.

Die Tüte wird auf dem Schriftfeld mit dem Namen der Schule und der Klasse/dem Kurs beschriftet: z.B. „Musterschule, Klasse 5a“. Zusätzlich sollte noch der jeweilige Barcode der Klasse/des Kurses handschriftlich darauf geschrieben werden.



Alternativ kann - falls vorhanden - der von uns gelieferte Barcode mit der Aufschrift „Pool-Tüte“ oben rechts aufgeklebt werden.

EINZELPROBE FÜR EINZEL-PCR-TESTUNG IM POSITIVEN FALLE :

- 1.** Die PCR-Stäbchen (erkennbar an der integrierten Hülle) werden nach dem Test verschlossen.

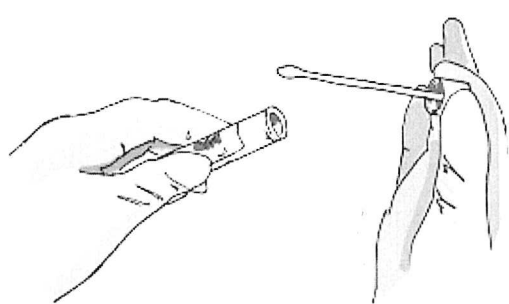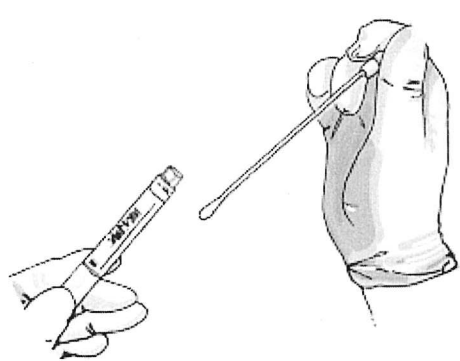


- 3.** Die Gefäße mit den PCR-Stäbchen für die Einzeltestungen werden in die kleine Plastiktüte gelegt und verschlossen.

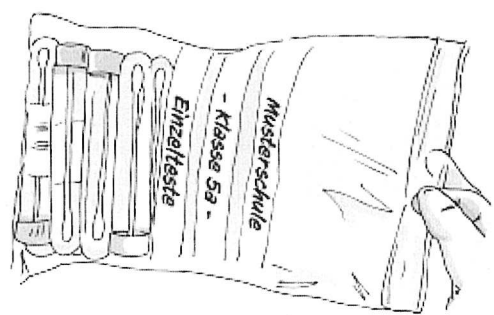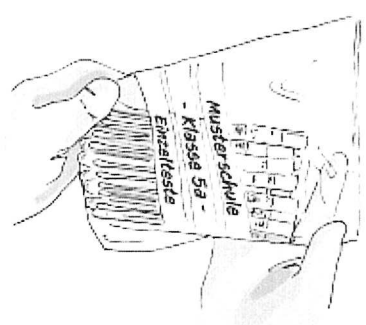

- 4.** Die Tüte wird mit dem Schulnamen, der Klasse/ dem Kurs und „Einzelteste“ beschriftet.

Bei Rückfragen zum Probenversand oder den Testergebnissen wenden Sie sich bitte an die Rufnummer 0571/790-5678 oder per E-Mail an infocorona@muenhlenkreiskliniken.de. Bei Fragen rund um die Logistik wenden Sie sich bitte an die Hotline des Landes NRW.

- 2.** Die Gefäße der PCR-Stäbchen werden dann einzeln für jede Schülerin/jeden Schüler mit der zugehörigen 10-stelligen Labornummer aus der digitalen Anmeldung beschriftet bzw. der entsprechende Barcode wird aufgeklebt.

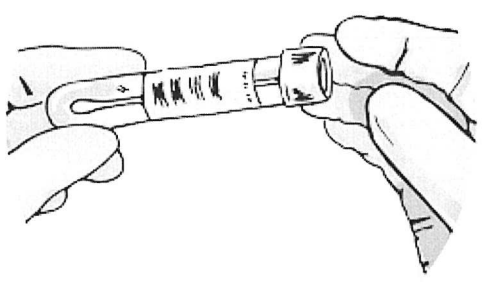


SARS-COV-2 PCR LOLLI-TEST FÜR SCHULEN

Versandvorbereitung


SAMMELPROBE FÜR POOL-PCR:

SAMMELPROBE FÜR POOL-PCR:

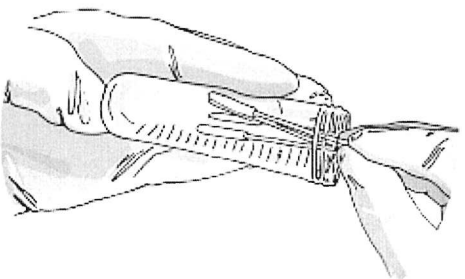

1.

Die Lollipop-Stäbchen aus einer Klasse/einem Kurs werden in einem beigefügten, großen Schraubgefäß gesammelt und das Gefäß wird zugeschraubt.

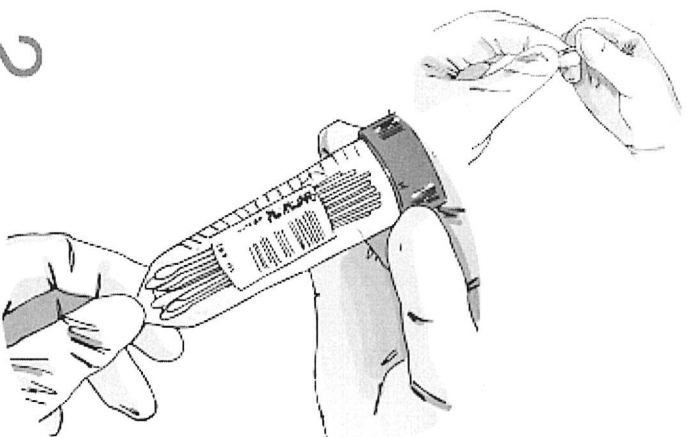


2.

Das Gefäß wird mit der 10-stelligen Labornummer aus der digitalen Anmeldung beschriftet. Falls vorge-druckte Barcodes von uns ausgehändigt werden, diese bitte mit dem Barcode in Längsausrichtung (senkrecht) auf das Schraubgefäß kleben.

3.

Das so beschriftete Schraubgefäß wird in die kleine Plastiktüte gelegt. Gegebenenfalls durchgeführte Einzeltests in Abstrichröhrchen aus dieser Klasse/diesem Kurs werden ebenfalls hinzugefügt. Die Tüte wird verschlossen.

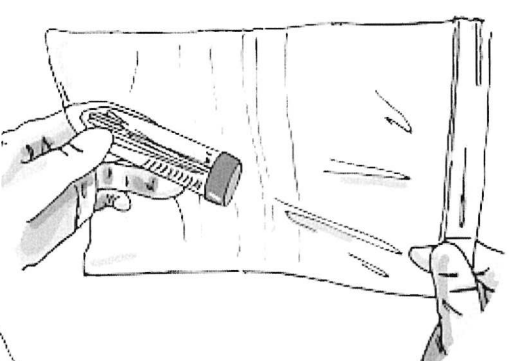

4.



Die Tüte wird auf dem Schriftfeld mit dem Namen der Schule und der Klasse/dem Kurs beschriftet: z.B. „Musterschule, Klasse 5a“. Zusätzlich sollte noch der jeweilige Barcode der Klasse/des Kurses handschriftlich darauf geschrieben werden.




Alternativ kann - falls vorhanden - der von uns gelieferte Barcode mit der Aufschrift „Pool-Tüte“ oben rechts aufgeklebt werden.

EINZELPROBE FÜR EINZEL-PCR-TESTUNG IM POSITIVEN FALLE :

- 1.** Die PCR-Stäbchen (erkennbar an der integrierten Hülle) werden nach dem Test verschlossen.

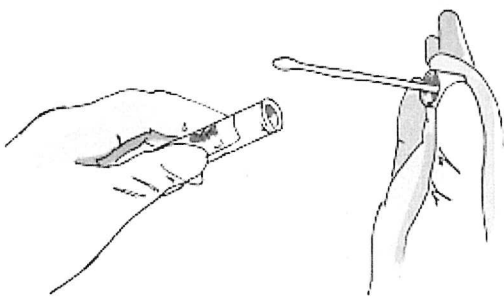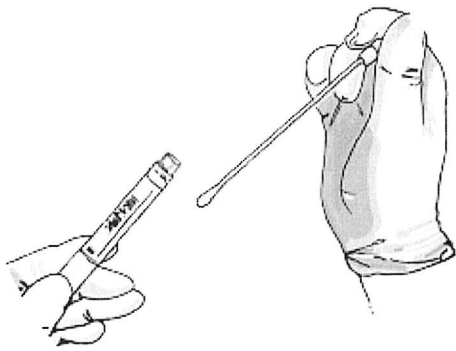


- 3.** Die Gefäße mit den PCR-Stäbchen für die Einzeltestungen werden in die kleine Plastiktüte gelegt und verschlossen.

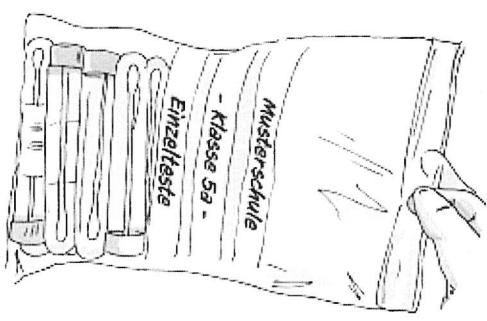

- 4.** Die Tüte wird mit dem Schulnamen, der Klasse/ dem Kurs und „Einzelteste“ beschriftet.


Bei Rückfragen zum Probenversand oder den Testergebnissen wenden Sie sich bitte an die Rufnummer 0571/790-5678 oder per E-Mail an infocorona@muehlenkreiskliniken.de. Bei Fragen rund um die Logistik wenden Sie sich bitte an die Hotline des Landes NRW.

- 2.** Die Gefäße der PCR-Stäbchen werden dann einzeln für jede Schülerin/jeden Schüler mit der zugehörigen 10-stelligen Labornummer aus der digitalen Anmeldung beschriftet bzw. der entsprechende Barcode wird aufgeklebt.

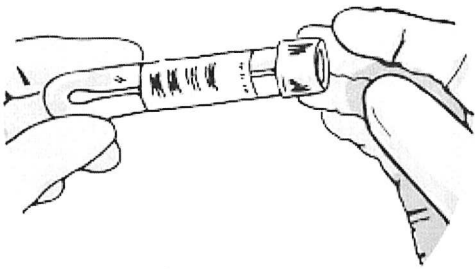



Hotline der Bezirksregierungen zur Koordination zwischen Schulleitung, Laboren & Logistik

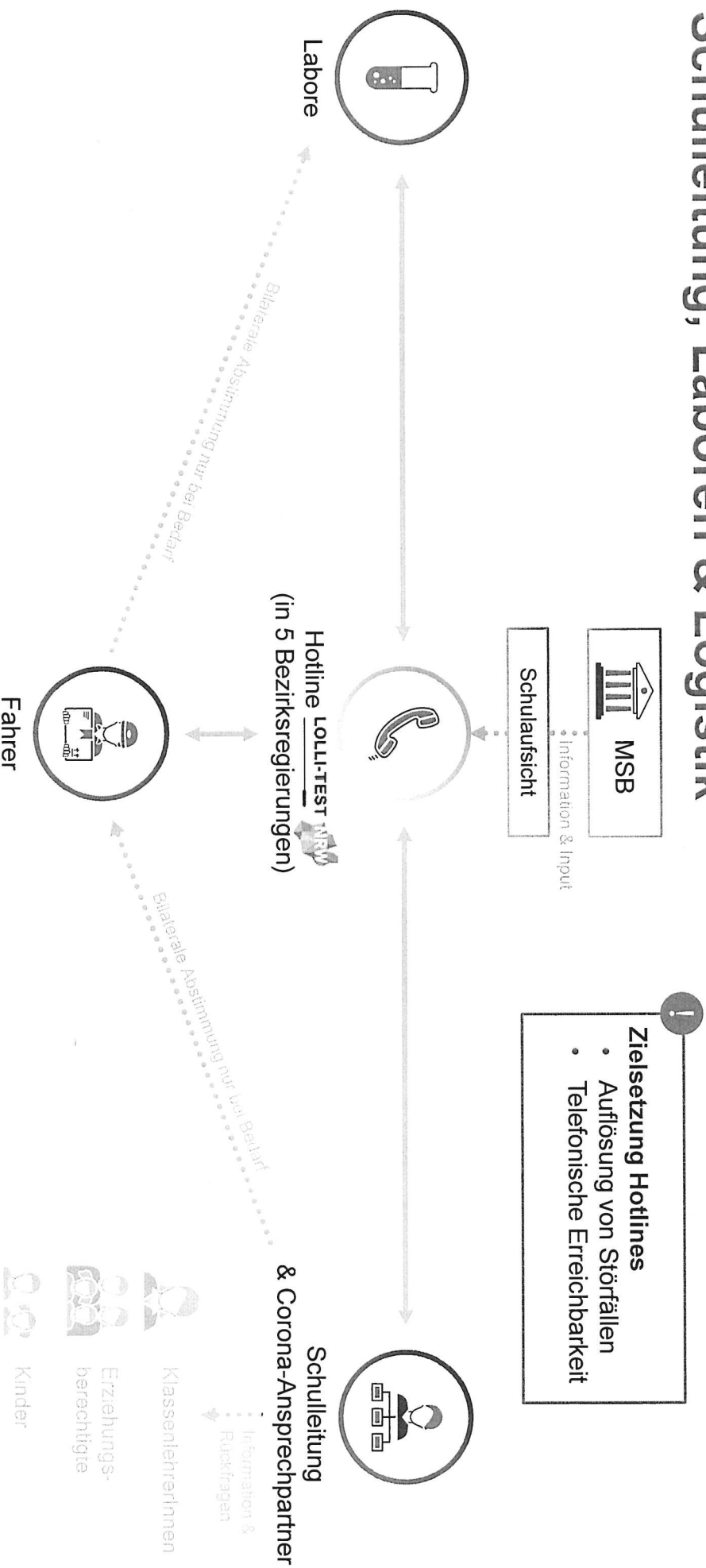



Hotline der Bezirksregierungen zur Koordination zwischen Schulleitung, Laboren & Logistik

